

MEISINGER

Polierer - Drehzahlempfehlungen Polishers - Recommended Speed

Universalpolierer Universal Polishers			
	Beschreibung Discription	Empfohlene Drehzahl (min ⁻¹) Recommended Speed (min ⁻¹)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹) Maximum Speed (min ⁻¹)
	3-Stufen Systeme 3-Step Systems	7.000 - 12.000	20.000
	3-Stufen Systeme 3-Step Systems	7.000 - 12.000	20.000
	1-Stufen Systeme 1-Step Systems	7.000 - 10.000	20.000
	1-Stufen Systeme 1-Step Systems	7.000 - 10.000	20.000
	3-Stufen Systeme 3-Step Systems	7.000 - 10.000	20.000

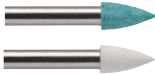
Hager & Meisinger GmbH

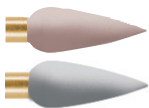
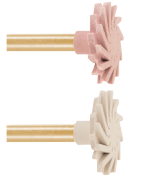
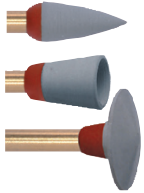
Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany

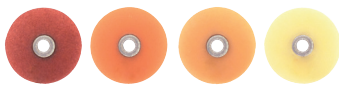
Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

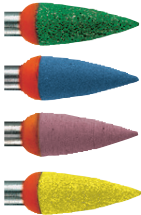
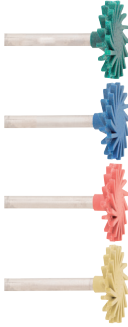
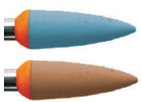
info@meisinger.de • www.meisinger.de

Meisinger
since
1888

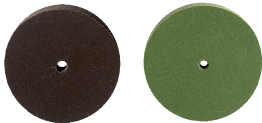
Prophylaxepolierer Polishers for Prophylaxis			
	Beschreibung Discription	Empfohlene Drehzahl (min ⁻¹) Recommended Speed (min ⁻¹)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹) Maximum Speed (min ⁻¹)
	Prophylaxe-Prophy-Cups	7.000 - 12.000	20.000
	Prophy-Clean	5.000 - 10.000	20.000
	Prophys	5.000 - 10.000	20.000
	Prophy Twist Polisher	8.000 - 10.000	10.000

Kompositpolierer Polishers for Composites			
	Beschreibung Discription	Empfohlene Drehzahl (min ⁻¹) Recommended Speed (min ⁻¹)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹) Maximum Speed (min ⁻¹)
	Einweg Diamant Komposit Polierer Single-Use Diamond Composite Polishers	3.000 - 10.000	10.000
	3-Stufen Systeme 3-Step Systems	5.000 - 8.000	20.000
	2-Stufen Systeme 2-Step Systems	3.000 - 8.000	20.000
	2-Stufen Systeme 2-Step Systems	RA: 10.000 - 12.000 HP: 7.500 - 10.000	RA: 20.000 HP: 15.000
	2-Stufen Systeme 2-Step Systems	7.000 - 10.000	20.000
	Hybridpolierer Hybrid Polisher, Diamond Impregnate	3.000 - 10.000	20.000

Super Flexible Discs Super Flexible Discs			
	Beschreibung Discription	Empfohlene Drehzahl (min ⁻¹) Recommended Speed (min ⁻¹)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹) Maximum Speed (min ⁻¹)
	Super Flexible Discs	7.000 - 10.000	20.000

Keramikpolierer Polishers for Ceramics			
	Beschreibung Discription	Empfohlene Drehzahl (min ⁻¹) Recommended Speed (min ⁻¹)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹) Maximum Speed (min ⁻¹)
	4-Stufen Systeme 4-Step Systems	7.000 - 12.000	20.000
	5-Stufen Systeme 5-Step Systems	7.000 - 12.000 Räder/Wheels: 7.000 - 10.000	20.000
	4-Stufen Systeme 4-Step Systems	RA: 10.000 - 12.000 HP: 7.500 - 10.000	RA: 20.000 HP: 15.000
	2-Stufen Systeme 2-Step Systems	7.000 - 12.000	20.000
	2-Stufen Systeme 2-Step Systems	7.000 - 12.000	20.000
	3-Stufen Systeme 3-Step Systems	7.000 - 15.000	25.000

Kunststoffpolierer Polishers for Acrylics			
	Beschreibung Discription	Empfohlene Drehzahl (min ⁻¹) Recommended Speed (min ⁻¹)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹) Maximum Speed (min ⁻¹)
	3-Stufen Systeme 3-Step Systems	5.000 - 7.000	15.000
	2-Stufen Systeme 2-Step Systems	5.000 - 7.000	15.000

Modellgusspolierer Polishers for Model Casting			
	Beschreibung Discription	Empfohlene Drehzahl (min ⁻¹) Recommended Speed (min ⁻¹)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹) Maximum Speed (min ⁻¹)
	braun/grün brown/green	7.000 - 12.000	20.000

Kauflächenpolierer Occlusal Surface Polishers			
	Beschreibung Discription	Empfohlene Drehzahl (min ⁻¹) Recommended Speed (min ⁻¹)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹) Maximum Speed (min ⁻¹)
	blau/grau/braun/grün/dunkelbraun blue/grey/brown/green/dark brown	10.000 - 15.000	30.000